

Kurzanleitung


Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Symbole und Bezeichnungen

EIN/AUS-Knopf

Die gelbe Batterieanzeige signalisiert, dass die Batterie aufgeladen werden sollte.

Die grüne Betriebsanzeige signalisiert, dass die Überwachungsfunktion vorschriftsmäßig arbeitet.

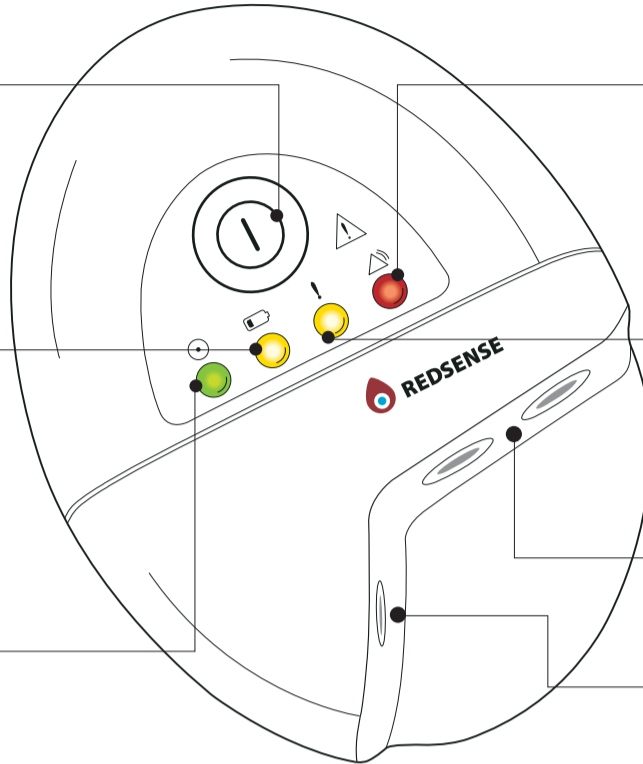


Die rote Alarmanzeige und ein Daueralarmton signalisieren, dass Blut auf den Sensor getropft ist, weil entweder die Nadel herausgerutscht ist oder ein Blutleck vorliegt.

Die gelbe Warnanzeige signalisiert Folgendes: Der Sensor ist mit Feuchtigkeit in Kontakt gekommen. Der Sensor hat sich gelockert oder ist defekt.


Anschlussbuchsen für die faseroptischen Sensorkabel

Steckbuchse für Batterieladegerät


Anbringen und in Betrieb nehmen

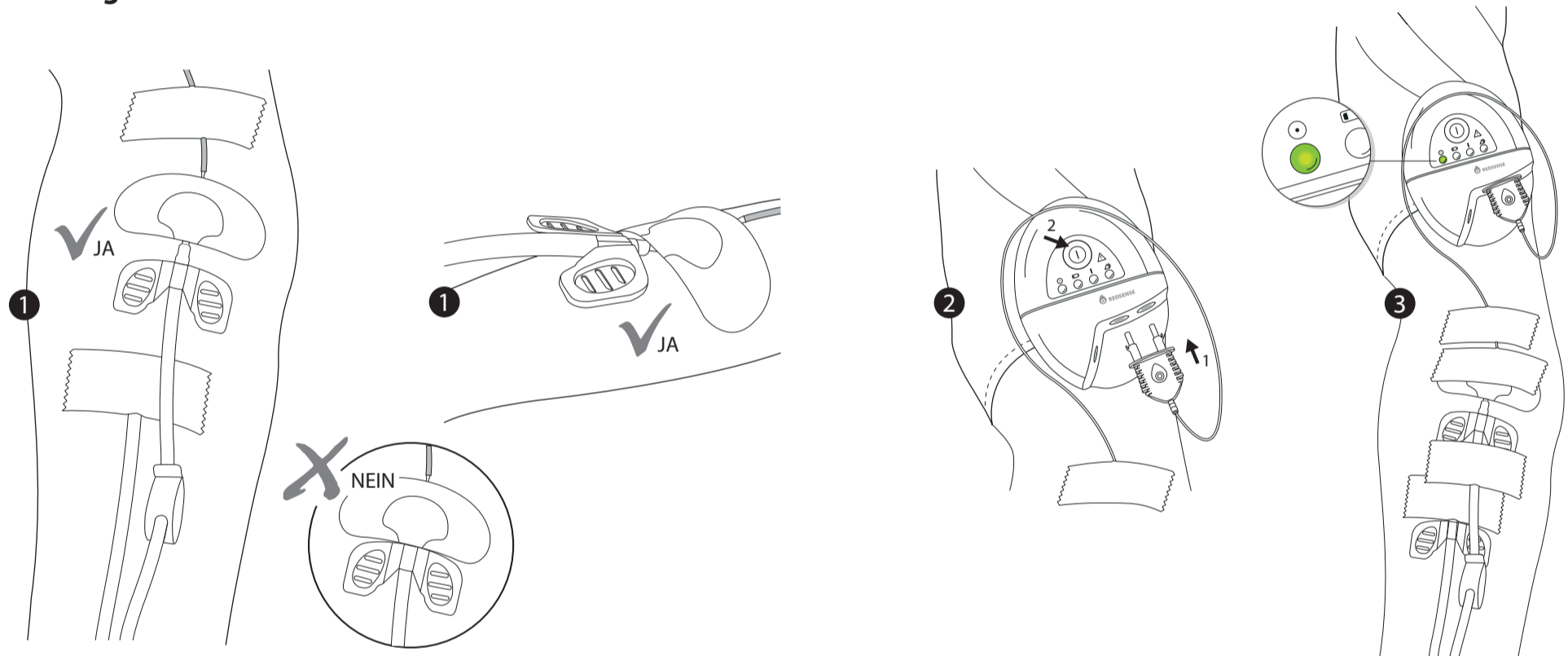

Befestigen des Alarmgebers

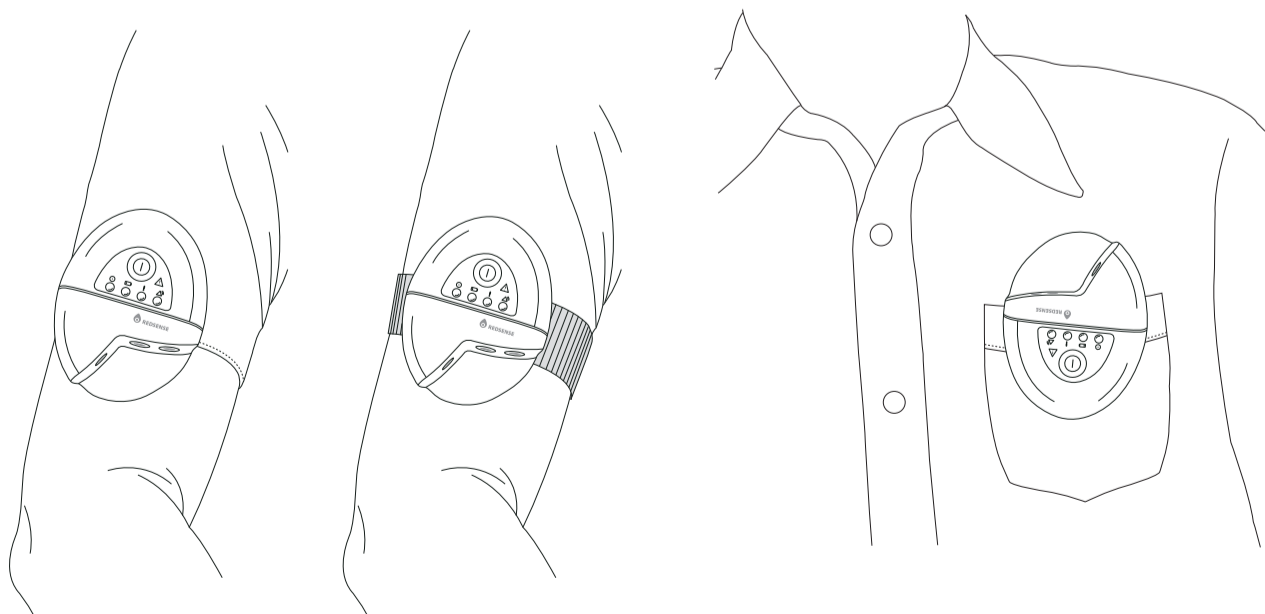

Batterie aufladen

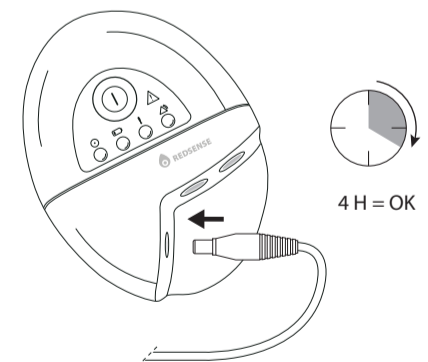

Beschriftungsfläche

